


Triolabintegration i Agitura Journal

För att aktivera Triolab-integrationen i Agitura krävs följande steg:


- 1) Konsultera er Triolab-kontakt för att få scil vIP Console installerat på den dator ni vill att provsvaren från era maskiner ska skickas till.
- 2) Navigera till “Export settings” i programmet, bocka i “Active” och fyll i sökvägen i “Export Directory” till katalogen där ni vill att provsvaren ska sparas. Innan ni stänger programmet så kopiera sökvägen ni angivit, så ni sedan kan ange den i Agitura Journal:

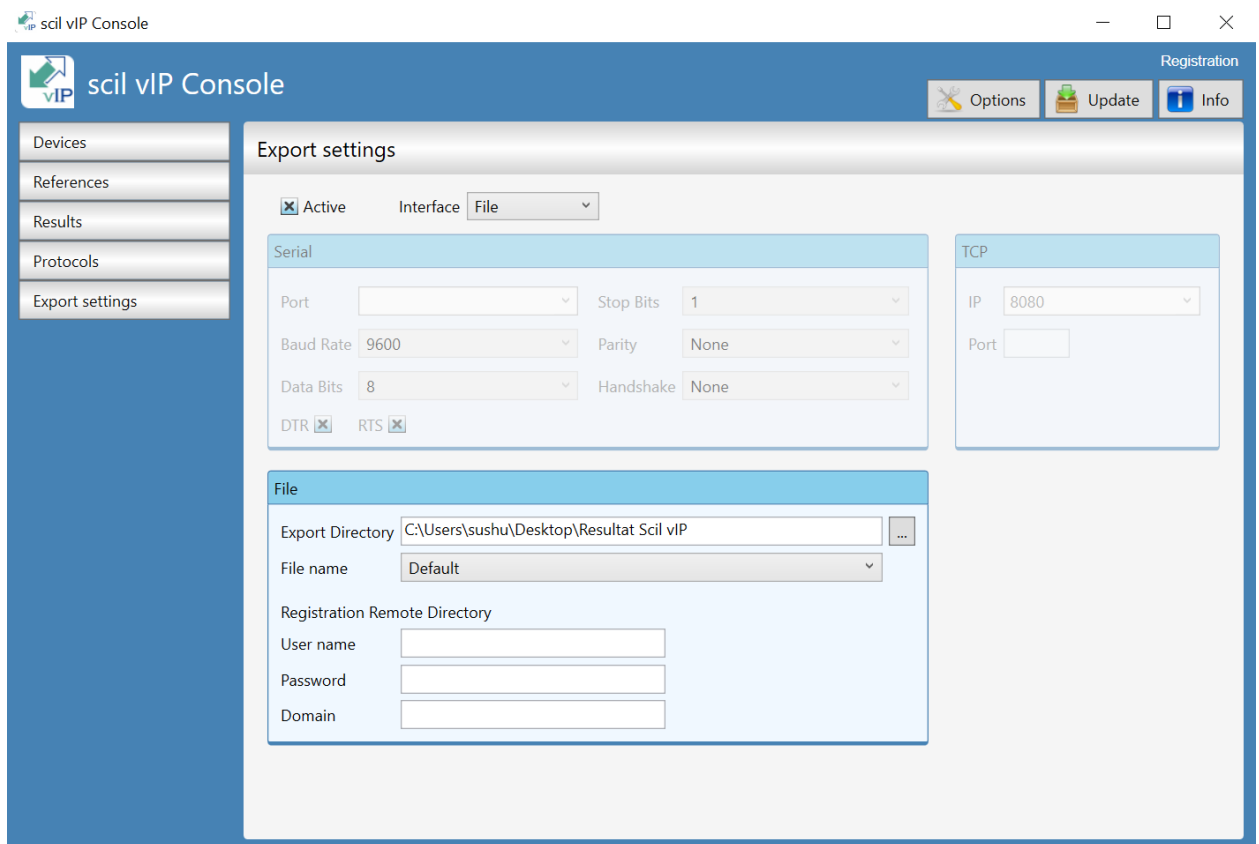

3) Starta Agitura Journal och navigera till Kugghjulet > Lab > Triolab:



4) Bocka för "Aktivera Triolab-integration", klistra in samma sökväg som ni angivit tidigare i inställningsdialogen i Agitura, klicka på "Spara" och starta sedan om Agitura Journal:

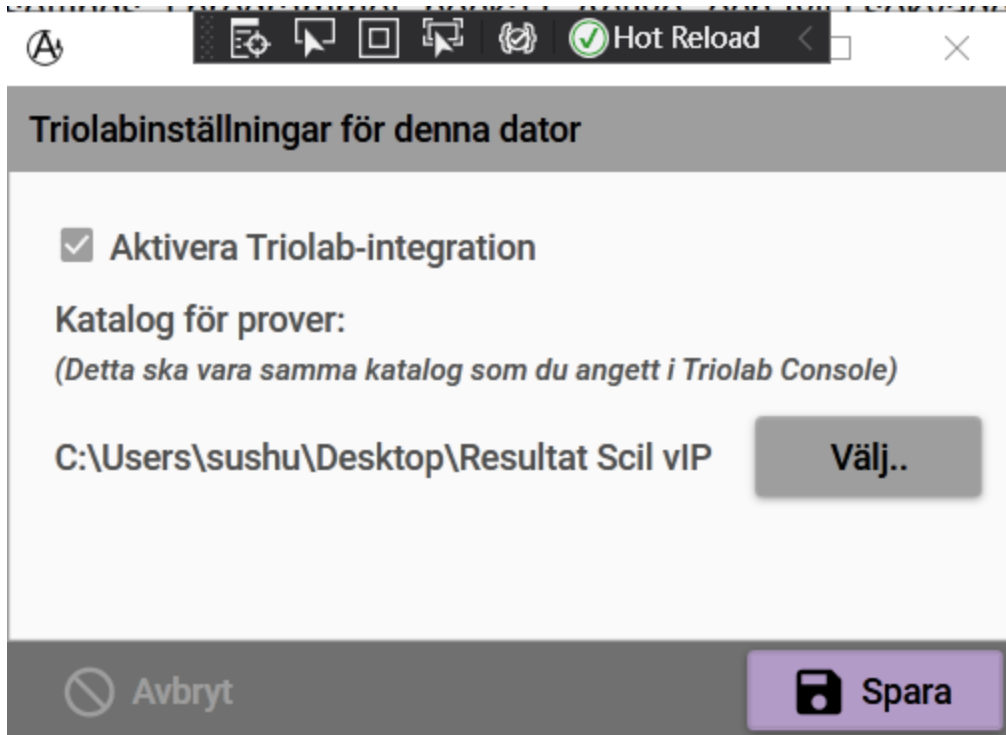

- 5) När ni kör lab i er Triolab-maskin måste patient_no eller sample_no i Triolab vara samma som djurnumret (DXXXXX) UTAN "D" först (dvs det 6-siffriga numret som följer "D") för patienten i Agitura. Detta för att vi ska kunna koppla rätt resultat till rätt patient i Agitura. Notera att ni inte kan ange någon annan text i det fält ni använder för djurets nummer, utan enbart numret ska finnas i fältet.

OBS! Vi på Agitura äger ingen Triolab-maskin, och denna integration är därför gjord med hjälp av snälla kunder som bidragit med sin tid och kunskap. På grund av detta kan integrationen innehålla buggar. Skulle ni använda integrationen och hitta sådana, så skicka gärna ett mail med så mycket information som möjligt om det till oss, så ska vi göra så gott vi kan för att åtgärda problemen!